

<i>Scuola:</i> I.C. "D. COSOLA"	Aggiornamento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Piano di Sicurezza COVID-19	Rev. 01 Maggio 2020
<i>Comune:</i> CHIVASSO (TO)	Allegato 5D: SCHEDA INFORMATIVA USO DPI	

Consulenza: Ing. Paolo Pieri - Torino

Allegato 5D - ATTIVITA' INFORMATIVA DPI COVID

- **SCHEDA DPI E ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**
- **ISTRUZIONI UTILIZZO MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI**
- **ISTRUZIONI UTILIZZO MASCHERINE CHIRURGICHE**
- **ISTRUZIONI UTILIZZO GUANTI MONOUSO**

* * *


Consulenza: Ing. Paolo Pieri - Torino

SCHEDA DPI E ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Titolo III del D.Lgs. 81/08)

I diversi tipi

Chirurgica
Non aderisce ai contorni del viso e impedisce la fuoriuscita da bocca e naso delle goccioline di secrezioni respiratorie




CAPACITÀ FILTRANTE

verso l'esterno	95%
verso chi la indossa	20%


FFP1-FFP2-FFP3 senza valvola Hanno un'elevata protezione. Proteggono chi la indossa e gli altri

FFP1




verso l'esterno	72%
verso chi la indossa	72%

FFP2



verso l'esterno	92%
verso chi la indossa	92%


FFP3



verso l'esterno	98%
verso chi la indossa	98%


FFP1-FFP2-FFP3 con valvola Tutte hanno una caratteristica comune: una migliore respirazione. Proteggono chi la indossa ma non gli altri perché dalla valvola esce il respiro. Indossate da chi è positivo contagia. L'FFP3 ha una protezione quasi totale

FFP1




verso l'esterno	20%
verso chi la indossa	72%

FFP2



verso l'esterno	20%
verso chi la indossa	92%

FFP3

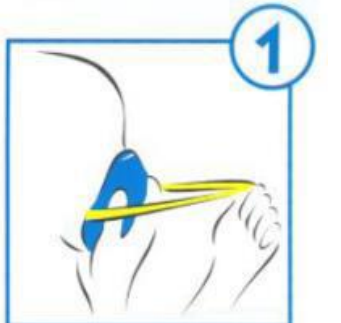





verso l'esterno	20%
verso chi la indossa	98%

<p>Scuola: I.C. "D. COSOLA"</p> <p>Comune: CHIVASSO (TO)</p>	<p>Aggiornamento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Piano di Sicurezza COVID-19</p> <p>Allegato 5D: SCHEDE INFORMATIVE USO DPI</p>	<p>Rev. 01 Maggio 2020</p>
--	---	------------------------------------

Consulenza: Ing. Paolo Pieri - Torino

ISTRUZIONI UTILIZZO MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI

<p>COME SI INDOSSANO</p>		<p>Lavare con cura le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica, tenere la maschera in mano con lo stringinaso verso le dita lasciando gli elastici liberi sotto la mano. Indossare la maschera sul volto con la conchiglia sotto il mento e lo stringinaso verso l'alto coprendo naso e bocca e mento.</p>
		<p>In base al modello posizionare il laccio inferiore intorno al collo al di sotto delle orecchie e l'elastico superiore sulla nuca oppure posizionare gli elastici intorno alle orecchie, a seconda della conformità del capo. Fare attenzione a, barba, baffi o basette lunghe che potrebbero compromettere il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta e quindi l'efficacia filtrante del dispositivo.</p>
		<p>Posizionare le di entrambe le mani sulla parte flessibile su entrambi i lati del naso, premere modellarla per farla aderire riducendo al minimo gli spazi tra viso e maschera.</p>
		<p>Verificare di aver indossato correttamente la maschera, con le mani pulite coprire il dispositivo evitando di muoverlo dalla propria posizione quindi inalare e trattenere il respiro per circa 5/10 secondi; se la maschera si ripiega leggermente verso l'interno allora il respiratore è posizionato bene. In caso di perdita dai bordi riposizionare il facciale e modificare la tensione degli elastici fino ad ottenere una perfetta tenuta sul volto, poi ripetere la prova di tenuta. Attenzione, durante l'uso evitare di toccare la maschera soprattutto nella parte anteriore, se necessario maneggiarla utilizzando gli elastici coi lacci sempre con mani pulite o guanti puliti; cambiare il dispositivo se risulta umido, contaminato o danneggiato.</p>

<p>Scuola: I.C. "D. COSOLA"</p> <p>Comune: CHIVASSO (TO)</p>	<p>Aggiornamento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Piano di Sicurezza COVID-19</p> <p>Allegato 5D: SCHEDA INFORMATIVA USO DPI</p>	<p>Rev. 01 Maggio 2020</p>
--	---	------------------------------------

Consulenza: Ing. Paolo Pieri - Torino



<p>COME SI RIMUOVONO</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Togliere la maschera prendendo il dispositivo dall'elastico senza mai toccare la parte anteriore, che potrebbe essere contaminata. • Gettarla nell'apposito contenitore di rifiuti. • Dopo la rimozione e ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata eseguire l'igiene delle mani con gel alcolico o con acqua e sapone.
---------------------------------	--	---

ISTRUZIONI UTILIZZO MASCHERINE CHIRURGICHE

<p>COME SI INDOSSANO</p>	 <p>Step 1:</p>	<p>Lavarsi le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina</p>
	 <p>Step 2:</p>	<p>Controllare che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi</p>
	 <p>Step 3:</p>	<p>Distendere la mascherina e tenere la parte più rigide in alto e la parte colorata verso l'esterno</p>
	 <p>Step 4:</p>	<p>Tenere la mascherina per gli elastici e agganciarli dietro le orecchie</p>

Scuola: I.C. "D. COSOLA" Comune: CHIVASSO (TO)	Aggiornamento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Piano di Sicurezza COVID-19 Allegato 5D: SCHEDE INFORMATIVE USO DPI	Rev. 01 Maggio 2020
---	---	---------------------------

Consulenza: Ing. Paolo Pieri - Torino

	 Step 5:	Assicurarsi che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento
	 Step 6:	Sagomare bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

COME SI RIMUOVONO		<ul style="list-style-type: none"> • Togliere prendendo il dispositivo dall'elastico senza mai toccare la mascherina poiché potrebbe essere contaminata. • Gettarla nell'apposito contenitore di rifiuti. • Dopo la rimozione e ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata eseguire l'igiene delle mani con gel alcolico o con acqua e sapone.
--------------------------	--	--

ISTRUZIONI UTILIZZO GUANTI MONOUSO

COME SI INDOSSANO		I guanti devono essere indossati tenendo la fine del guanto aperto con una mano per consentire all'altra mano di entrare facilmente
--------------------------	--	---

COME SI RIMUOVONO		Con la mano A pizzicare il fondo del guanto della mano B e sfilarlo rovesciandolo Con la mano A pizzicare il fondo del guanto della mano B e sfilarlo rovesciandolo
		Raccogliere il guanto sfilato nel palmo della mano A

<p>Scuola: I.C. "D. COSOLA"</p> <p>Comune: CHIVASSO (TO)</p>	<p>Aggiornamento DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Piano di Sicurezza COVID-19</p> <p>Allegato 5D: SCHEDE INFORMATIVE USO DPI</p>	<p>Rev. 01 Maggio 2020</p>
--	---	------------------------------------

Consulenza: Ing. Paolo Pieri - Torino

		<p>Inserire le dita della mano B all'interno del guanto della mano A e sfilare anche il secondo guanto rovesciandolo</p>
--	---	--

<p>AVVERTENZE</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Scegliere la taglia corretta • Non utilizzare guanti lacerati, forati o danneggiati. • Per ridurre la sudorazione delle mani possono essere indossati sottoganti in filo di cotone. • I guanti durante l'uso possono essere disinfettati con alcol o gel mani: in tal modo rimangono sterili e possono essere sostituiti con minore frequenza.
--------------------------	--	---